

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA CONTEC Icr – KLEJ DO RETAINERÓW JĘZYKOWYCH

1. Informacje o produkcie

CONTEC Icr to płynny, światłoutwardzalny, ultradrobny kompozyt hybrydowy. CONTEC Icr nie zawiera TEGDMA (dimetakrylanu glikolu trietylenowego) ani HEMA (metakrylanu 2-hydroksyetylu).

2. Skład

Silanizowane szkło barowe, BisGMA (dimetakrylan eteru diglicydowego bisfenolu A), BisEMA (dimetakrylan etoksylovanego bisfenolu A), katalizatory, inhibitory, dodatki.

3. Wskazanie

Klejenie retainersów językowych

4. Przeciwwskazania

Rozpoznana nadwrażliwość na metakrylany jak wyżej, kamforchinon i BHT (butylowany hydroksytoluen).

5. Działania niepożądane

Po zastosowaniu produktów o zbliżonym składzie zgłaszano pojedyncze przypadki alergii kontaktowych.

Uwaga: CONTEC Icr nie zawiera TEGDMA (dimetakrylanu glikolu trietylenowego) ani HEMA (metakrylanu 2-hydroksyetylu).

6. Interakcje

Należy unikać materiałów podstawy, których skład może utrudniać polimeryzację. Dotyczy to między innymi związków fenolowych, np. ZOE (cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego) i materiałów zawierających tymol.

7. Aplikacja, instrukcje bezpośredniego klejenia retainera językowego od kła do kła

7.1 Przygotowanie retainera

Dostosować retainer do kształtu powierzchni językowych od kła do kła i odłożyć.

7.2 Wytrawianie zęba

Oczyszczyć powierzchnię szkliva za pomocą proszku pumekсового niezawierającego oleju lub pasty polerskiej niezawierającej fluoru. Przepłukać wodą i osuszyć. Wytrawić szklivo przy użyciu długich zwitków waty bawełnianej w dolnym obszarze od kła do kła, aby wyizolować obszar przedsiódkowy i policzkowy. Nałożyć żelowy wytrawiacz z kwasem fosforowym, np. CONTEC (REF 163-115-00), na powierzchnie językowe zębów i pozostawić na 30 sekund. Wytrawianie należy przedłużyć o 10 sekund, jeżeli powierzchnia szkliva była wcześniej fluoryzowana. Następnie starannie optukać szklivo wodą, upewnić się, że żelowy wytrawiacz został w całości usunięty i ponownie zaizolować zwitkiem waty bawełnianej. Dokładnie wysuszyć.

7.3 Gruntowanie zęba

Nałożyć niewielką ilość primera CONTEC Ic (nr ref. 163-113-10) na podkładkę do mieszania. Następnie nanieść cienką, równomierną warstwę primera na szklivo, w miejscach, w których mają być zamocowane zamki. Polimeryzować przez 20 sekund światłem.

7.4 Klejenie retainera językowego

Umieścić nić dentystyczną w obszarze powierzchni stykających się między siekaczami bocznymi a kłami od strony językowej do policzkowej. Pozostawić pętlę skierowaną w stronę języka, przez którą zostanie poprowadzony drut językowy. Ukształtowany drut retainera umieścić w docelowym położeniu. Zamocować drut do pętli wykonanych z nici dentystycznych w prawidłowym położeniu.

Pociągając za końce nici dentystycznej do oporu, aby przesunąć drut językowy w stronę powierzchni językowych dolnych zębów siekających i kłów. Rozprowadzić CONTEC Icr na szkliwie albo z podkładki do mieszania, albo bezpośrednio ze strzykawki. Klej

powinien pokrywać drut i powierzchnię wokół drutu. Zakroplic niewielką ilość CONTEC lcr na każdy koniec drutu. Nakładać tylko tyle materiału, ile jest potrzebne. Polimeryzować każdą kroplę przez 20 sekund i usunąć nić dentystyczną. W razie potrzeby przyciąć i wypolerować.

8. Ostrzeżenia / środki ostrożności

- Źródło światła obsługiwać zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi postępowania z urządzeniem, prawidłowej obsługi i ochrony oczu.
- W razie obawy, że siekacze mogą zbyt rotować, retainer językowy można dopasować przed całkowitym usunięciem dolnego zamka z siekaczy. W przeciwnym razie retainer językowy można założyć po odklejeniu.
- Wskazane czasy utwardzania dotyczą lamp polimeryzacyjnych o natężeniu światła co najmniej 700 mW/cm². Czas utwardzania światłem może się różnić w zależności od źródła światła i instrukcji użycia. Lampa musi emitować światło o długości fali 400-500 nm.
- Przed nałożeniem należy sprawdzić, czy materiał ma temperaturę pokojową.
- Tubki z klejem CONTEC lcr (REF 163-120-00) są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku i należy je usunąć po każdym zastosowaniu. Po użyciu zamknąć nasadkę strzykawki.
- Standardowe rękawice medyczne nie zapewniają skutecznej ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanu. W razie kontaktu materiału z rękawicą należy zdjąć i zutylizować rękawicę. Natychmiast umyć dłonie mydłem i wodą i założyć nowe rękawice. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy skontaktować się z lekarzem.

9. Przechowywanie

Produkty światłoutwardzalne należy chronić przed światłem i wysoką temperaturą. CONTEC lcr jest przeznaczony do stosowania w temperaturze pokojowej (20–25 °C / 68–77 °F). Przechowywać w temp. 4 – 28 °C (39 – 82 °F). Produkt światłoczuły. Jeżeli temperatura pokojowa przekracza 28 °C (82 °F), produkt należy umieścić w lodówce. Nie zamrażać!

10. Numer partii i termin przydatności

W zapytaniach należy posługiwać się numerem partii. Termin ważności znajduje się na opakowaniu. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

11. Środki ostrożności

Po każdym zastosowaniu należy zamknąć pojemnik odpowiednią zakrętką. Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie w stomatologii. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Procedury awaryjne

W razie kontaktu produktu z błoną śluzową jamy ustnej należy dokładnie przepłukać wodą. W razie kontaktu produktu z oczami należy dokładnie przepłukać wodą. Następnie skonsultować się z lekarzem okulistą.

15. Higiena

Narzędzie do aplikacji stosować tylko u jednego i tego samego pacjenta. Produkt usuwać w pewnej odległości od fotela dentystycznego, aby uniknąć zanieczyszczenia.

16. Gwarancja

Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości naszych produktów. W razie wad jakościowych zostanie zwrócona wyłącznie wartość danego produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niezgodności z instrukcjami stosowania ani niewłaściwego postępowania z produktem lub stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu użytkownik powinien sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy wszystkich zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikłe szkody.

17. Wyjaśnienie symboli na etykietach

Sprawdź etykietę. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.dentaurum.com (wyjaśnienie symboli, patrz REF 989-313-00).