

Instrukcje stosowania łuków twarzowych

Szczegółowe informacje na temat naszych produktów dostępne są na stronie

www.dentaurum.com

Data wydania: 01.07.2019

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian

DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Niemcy | Tel. + 49 72 31/803 -0 | Faks +497231/803- 295

www.dentaurum.com | info@dentaurum.com

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości produktu firmy Dentaurum.

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy uważnie przeczytać ten dokument i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.

Pisemna instrukcja nie obejmuje wszystkich sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas stosowania produktu. Z tego powodu stworzyliśmy infolinię, dzięki której mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

Cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów, dlatego nawet jeżeli używają Państwo tych samych produktów przez dłuższy czas, zalecamy zapoznanie się z załączoną najnowszą wersją instrukcji. Informacje można też uzyskać na naszej stronie internetowej www.dentaurum.com.

1. Wytwórca

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Niemcy

2. Informacje ogólne

Łuki twarzowe składają się z łuku wewnętrznego wkładanego do jamy ustnej i łuku zewnętrznego biegnącego na zewnątrz jamy ustnej. Oba łuki są połączone na środku spawem laserowym.

3. Zastosowanie

Łuk twarzowy jest stosowany jako zewnętrzne zakotwiczenie i/lub korekcja anomalii zębów i układu kostnego w płaszczyźnie pionowej i strzałkowej.

4. Środki ostrożności – wskazówki dla ortodonta

U Pani/Pana pacjenta zostanie zastosowany łuk twarzowy i wyciąg w ramach leczenia ortodontycznego.

Łuk twarzowy i wyciąg należy stosować ściśle według zaleceń ortodonta.

Pacjenta należy poinformować o tym, że niewłaściwe stosowanie lub usunięcie łuku twarzowego, bez uprzedniego poluzowania elastycznych taśm wyciągu, może spowodować poważne obrażenia w wyniku odbicia łuku twarzowego. Ze względów bezpieczeństwa i **w celu ochrony pacjentów należy stosować wyłącznie wyciągi wyposażone w moduły bezpieczeństwa!**

Wyciąg oraz łuk twarzowy może wydawać i zakładać wyłącznie ortodonta.

5. Skład

Skład podano w wykazie materiałów, patrz informacje w katalogu lub na stronie internetowej www.dentaurum.com.

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy stosować produktu, jeśli istnieje rozpoznana reakcja alergiczna na co najmniej jeden ze składników materiału.

7. Informacja o produktach jednorazowego użytku

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Rekondycjonowanie użytego produktu (recykling) i jego ponowne zastosowanie u pacjenta jest niedozwolone.

8. Instrukcje dotyczące dezynfekcji

Dezynfekcja przed pierwszym użyciem produktu nie jest konieczna.

9. Instrukcje dotyczące usuwania

Nie obowiązują żadne specjalne środki ostrożności podczas usuwania łuków twarzowych po zakończeniu leczenia.

10. Dostawa

Łuki twarzowe są dostępne w rozmiarach mini, medium i maxi. Szczegółowe informacje przedstawiono w najnowszym katalogu produktów ortodontycznych.

11. Normy jakości

Dentaurum gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Zalecenia zamieszczone w niniejszej instrukcji opracowano na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń.

Jednak to użytkownik ponosi odpowiedzialność za konkretne stosowanie produktów Dentaurum. Producent nie odpowiada za usterki produktu, gdyż nie może skutecznie kontrolować sposobów ich użytkowania.

12. Objasnienie symboli użytych na etykiecie

Sprawdź etykietę. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.dentaurum.com (wyjaśnienie symboli, patrz REF 989-313-00).

Środki ostrożności – wskazówki dla pacjenta / zapobieganie urazom

1. Łuk twarzowy i wyciąg należy stosować ściśle według zaleceń ortodonta. Podczas zakładania wyciągu i łuku twarzowego należy postępować zgodnie z instrukcjami ortodonta.
2. Łuk twarzowy można zakładać i zdejmować wyłącznie po uprzednim poluzowaniu elastycznych taśm lub łańcuszków z tworzywa sztucznego.
3. Nie można pociągać za wyciąg ani łuk twarzowy. Istnieje ryzyko poważnego urazu.
4. Łuk twarzowy należy wysuwać z jamy ustnej zawsze w płaszczyźnie poziomej, nigdy pionowo.
5. Łuku twarzowego ani wyciągu nie można nosić podczas aktywności fizycznej.
6. Pytania dotyczące właściwego stosowania łuku twarzowego lub wyciągu należy kierować do ortodonta.
7. W przypadku niewłaściwego stosowania produktu końcówki łuku twarzowego mogą spowodować poważne urazy.