

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie wysokiej jakości produktu Dentaurum. Konieczne jest uważne przeczytanie tych instrukcji i przestrzeganie ich aby zapewnić bezpieczne, wydajne użytkowanie oraz aby uzyskać pełne korzyści dla Ciebie i Twoich klientów. Instrukcje użytkowania mogą nie opisywać każdej ewentualności i możliwości aplikacji produktu.

W przypadku pytań lub pomysłów skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Ponieważ nasze produkty są regularnie ulepszone, zalecamy uważne zapoznanie się z aktualnymi instrukcjami użytkowania dostarczonymi z produktem i znajdującymi w Internecie na stronie www.dentaurum.com, nawet jeśli często używasz tego samego produktu.

1. Producent

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany

2. Opis produktu

Izolator tworzy warstwę oddzielającą pomiędzy modelem plastikowym a Orthocryl® / Orthocryl® LC.

3. Instrukcje przetwarzania

3.1 W razie potrzeby zablokuj podcięcie w obszarze zębów / szczęki podczas wytwarzania używając procesu drukowania 3D.

3.2 Oczyszczyć plastikowy model i, jeśli to konieczne, utwórz otwory / szczeliny dla śruby.

3.3 Umieścić śrubę w odpowiednim miejscu i wygnij elementy druciane.

3.4 Nałożyć równomiernie środek rozdzielający 3D za pomocą pędzla na cały model przed połączeniem śruby (lub śrubami) z elementami z drutu i ostatecznie przymocuj pozwalając Izolatorowi dokładnie wyschnąć.

3.5 Jeśli to potrzebne nanieść drugą warstwę izolatora.

3.6 W razie potrzeby zablokować podcięcie w obszarze zęba / szczęki oraz zamocować śruby i elementy drutowe jak zwykle, na wysuszonym plastikowym model. Użyj wosku Thermo (REF 120-170-00), aby uniknąć efektu mlecznego plastiku.

3.7 W razie potrzeby użyj paska woskowego jako granicy dla plastiku.

3.8 Przetwarzaj plastik jak zwykle. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkowania.

3.9 Pozostałości z Izolatora można łatwo usunąć za pomocą odkurzacza parowego lub wody i pędzla.

4. Przechowywanie i okres trwałości

Chronić środek separujący 3D przed zanieczyszczeniem i przechowywać w zamkniętym pojemniku. Nie używać po upływie terminu ważności.

5. Dostępność

Izolator 3D, 100 ml, REF 162-801-00

6. Informacje o jakości

Dentaurum zapewnia nienaganną jakość swoich produktów. Te rekomendacje oparte są na własnych doświadczeniach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie produktu. Firma Dentaurum nie może wziąć odpowiedzialności za niepowodzenia, ponieważ, nie ma wpływu na wykorzystanie i przetwarzanie produktu przez użytkownika.

7. Objaśnienie symboli używanych na etykietach

Proszę odnieść się do etykiety. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dentaurum.com (Objaśnienie symboli na etykietach REF 989-313-00).